

# ОПТИНОЛ

КАПЛИ ГЛАЗНЫЕ

RU

0,21%

0,40%

## Инструкция по применению

Средство увлажняющее офтальмологическое «Оптинол» в виде капель 0,21 %, 0,4 % во флаконах по 10 мл

### Регистрационное удостоверение:

Состав на 1 мл (0,21 %):

Натрия гиалуронат – 2,115 мг,  
Натрия хлорид – 8,358 мг,  
Натрия дигидрофосфата дигидрат – 0,705 мг,  
Динатрия фосфат безводный – 1,108 мг,  
Вода очищенная – до 1 мл.

Состав на 1 мл (0,4 %):

Натрия гиалуронат – 4,028 мг,  
Натрия хлорид – 8,358 мг,  
Натрия дигидрофосфата дигидрат – 0,705 мг,  
Динатрия фосфат безводный – 1,108 мг,  
Вода очищенная – до 1 мл.

Не содержит консервантов.

### ВНЕШНИЙ ВИД:

Прозрачный бесцветный или светло-желтый, вязкий раствор.

### ОПИСАНИЕ:

Средство увлажняющее офтальмологическое «Оптинол» представляет собой изотонический (pH 5,0 – 8,5), буферизированный, стерильный раствор, содержащий в своем составе активный компонент – натрия гиалуронат, использующийся в офтальмологии в качестве лубриканта. Сухость глаз – часто встречающееся состояние примерно у 10 – 20 % взрослого населения. Искусственная слеза эффективно снижает выраженность симптомов сухости глаза слабой и умеренной степени путем восполнения объема слезы. Натрия гиалуронат используется в качестве компонента искусственной слезы вследствие вязкоупругих реологических свойств. Искусственная слеза служит в качестве заменителя природной слезы в случае недостаточной секреции или изменения состава слезной жидкости для защиты, увлажнения и смазывания глаз, смягчая ощущение рези в глазах.

### СУХОСТЬ ГЛАЗ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ВСЛЕДСТВИЕ:

- нарушений слезной пленки, вызванных пониженной секрецией слезы или чрезмерным испарением слезы, что может привести к повреждению поверхности глаза и симптомам дискомфорта;
- воздействия внешней среды (центральное отопление, климатические установки, флуоресцентные лампы, дым и ветер);
- продолжительной работы за компьютером;
- использования сосудосуживающих глазных капель;
- старения (75% населения старше 65 лет страдает синдромом «сухого глаза»);
- ношения контактных линз;
- оперативного вмешательства или механического повреждения глаза;
- гормональных изменений у женщин в течение беременности, грудного вскармливания, менструации или менопаузы;
- применения лекарственных средств: антидепрессантов, антигипертензивных средств, контрацептивов и других;
- различных заболеваний, таких как ревматоидный артрит, диабет, астма, заболевания щитовидной железы, глаукома и т.д.

Средство увлажняющее офтальмологическое «Оптинол» в виде капель 0,21 %, предназначенное для «сухих глаз», может использоваться и при ношении контактных линз. Средство увлажняющее офтальмологическое «Оптинол» в виде капель 0,4 % за счет вязкости обеспечивает более длительное сохранение гиалуроната натрия на поверхности глаза, в результате этого продлевается увлажнение, а также повышается защита. При ношении контактных линз, перед использованием капель для «сухих глаз» «Оптинол» 0,4 %, рекомендуется на 15 минут снимать линзы. Гиалуронат натрия является составной частью жидкости и стекловидного тела глаз. При инстилляции гиалуроната натрия, содержащегося в средстве увлажняющем офтальмологическом «Оптинол», на передней поверхности роговой оболочки глаза образуется тонкая пленка, предохраняющая глаз от пересыхания, таким образом удаляя ощущение сухости, рези и раздраженности глаз. Действие защитной пленки начинается практически сразу, длительность эффекта при применении капель составляет около 2-3 часов, при этом защитная пленка постепенно вымывается при моргании вместе со слезной жидкостью. Используется также при оперативных вмешательствах, а также при синдроме «сухого глаза», возникшем после использования офтальмологических противовоспалительных препаратов (по рекомендации врача).

### НАЗНАЧЕНИЕ И ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Средство увлажняющее офтальмологическое «Оптинол» в виде капель 0,21 %, 0,4 %, во флаконах по 10 мл предназначено для дополнительного смазывания/ увлажнения глаз.

Применяется для увлажнения сухих, уставших и/ или напряженных глаз при:

- синдроме сухого глаза (нарушение с симптомами сухости, «песка в глазах», жжения);
  - возрастных/ гормональных изменениях (менопауза);
  - воздействии экологических факторов, таких как загрязнение окружающей среды, прием лекарств, использование компьютера, кондиционирование воздуха, а также ношение контактных линз.
- «Оптинол» 0,21 %, капли при синдроме «сухого глаза» предназначены для смягчения легкой рези глаз.  
«Оптинол» 0,4 %, капли при синдроме «сухого глаза» предназначены для смягчения сильной рези глаз.

ASU0849/V1

# ОПТИНОЛ

КАПЛИ ГЛАЗНЫЕ

0,21%


0,40%

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Капли можно использовать несколько раз в день по необходимости. Закапать 1–2 капли в глаз, моргнуть несколько раз, чтобы раствор равномерно распределился по поверхности глаза. Возможно использование в течение неограниченного периода времени, поскольку капли «Оптинол» не содержат консервантов и не являются опасными для применения.

### УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Снимите защитный колпачок с флакона. Старайтесь не касаться открытого кончика капельницы флакона.
2. Положите указательный и средний пальцы на дно флакона, а большой палец на круглую пластину в верхней части флакона.
3. Перед первым использованием флакона переверните его кончиком вниз и 2-3 раза нажмите на нажимную пластину большим пальцем до появления первой капли. Не отрезайте кончик флакона.
4. Запрокиньте голову назад, указательным пальцем осторожно отведите нижнее веко вниз, посмотрите вверх. По возможности держите флакон вертикально. Старайтесь избегать контакта кончика флакона с пальцами, поверхностью глаза или линзами.
5. Для закапывания средства один раз нажмите на флакон. Благодаря запатентованному механизму, которым оснащен флакон, из капельницы при каждом нажатии выделяется ровно одна капля.
6. Медленно закройте глаза, чтобы раствор равномерно распределился по всему глазу.
7. Повторите процедуру для второго глаза.
8. После каждого использования флакона просушите кончик капельницы и закройте его защитным колпачком.

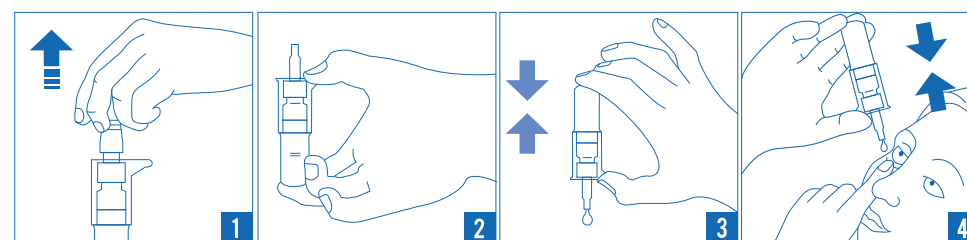

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Повышенная чувствительность к компонентам медицинского изделия.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не применяйте капли при аллергии на любой из компонентов, а также при появлении дискомфорта и раздражения глаз.
- При наличии инфекции, покраснения, воспаления и боли в глазах обратитесь к врачу-офтальмологу.
- Не используйте капли одновременно с другими препаратами или офтальмологическими средствами, так как это может изменить их действие.
- Контактные линзы следует снять перед применением капель «Оптинол» и установить их после закапывания.
- Не дотрагивайтесь до кончика флакона и старайтесь не допускать его контакта с поверхностью глаза.
- Не промывайте кончик флакона моющими средствами.
- Не используйте флакон, если его герметичность нарушена.
- Не для приема внутрь.
- Не используйте по истечении срока годности.

### ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Аллергические реакции, неприятное чувство склеивания век (из-за большой вязкости раствора).

### СРОК ГОДНОСТИ:

2 года. Не использовать по истечении срока годности. После вскрытия флакона капли следует использовать в течение 6 месяцев.

### ФОРМА ВЫПУСКА И УПАКОВКА:

По 10 мл во флаконе из полиэтилена высокой плотности с нажимным колпачком. По одному флакону помещают в картонную пачку вместе с инструкцией по применению.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ:

Хранить при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте. Медицинское изделие транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Температура транспортировки от 0 оС до + 40 оС.

### УТИЛИЗАЦИЯ:

Медицинские изделия должны утилизироваться местными публично-правовыми организациями, в соответствии с требованиями местных организаций и правилами утилизации в данном регионе.

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilo 20, 51000 Rijeka, Croatia  
(ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИИ а.о., Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия)

### МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА:

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilo 20, 51000 Rijeka, Croatia  
(ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИИ а.о., Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия)

Претензии к качеству продукта следует направлять в адрес ООО «ЯДРАН»: 119330, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д.38, оф. VII, тел./факс (499) 143-33-71.

